

FB'Spray

DÉTERGENT DÉSINFECTANT
POUR LE BIONETTOYAGE DES
SURFACES



■ AVANTAGES ET QUALITÉS

- Solution à pH neutre
- Sans phosphates, sans EDTA, sans colorant, sans parfum
- Prêt à l'emploi
- Flacon avec dispenseur de mousse
- Compatibilité avec un large panel de matériaux
- Formulation sans chlorure
- Enregistrement biocide : TP 02/04
- Efficace contre les virus enveloppés

FB'Spray

DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR LE BIONETTOYAGE DES SURFACES

MODE D'EMPLOI

■ Lors de la 1^{ère} utilisation :

- Porter des gants

■ Utilisation :

- 1- Pulvériser ou répartir uniformément **FB'Spray** directement sur la surface à traiter ou sur une lingette sèche non tissée à usage unique
- 2- Répartir la solution / mousse sur la surface avec la lingette

- 3- Temps de contact : Selon activité antimicrobienne recherchée

- 4- Ne pas rincer*

**Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface traité ou pour les surfaces en contact avec la peau et les muqueuses.*

- 5- Jeter le support

- 6- Renouveler l'opération si nécessaire

PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727 / EN 13697	5 min.
	EN 1276	2 min.
	EN 14561	10 min.
Levuricidie	EN 13624 / EN 13697 / EN 1650	5 min.
	EN 14562	10 min.
Fongicidie	EN 13624 / EN 13697 / EN 1650	15 min.
Virucidie	EN 14476 PRV (Virus modèle de l'hépatite B), BVDV (Virus modèle de l'hépatite C), Rotavirus	5 min.
	EN 14476 Vaccinia Virus	5 min.
Sporidicie	EN 13704 Clostridium difficile	15 min.
	EN 17126 Clostridium difficile	15 min.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide fluide**
- pH : 6

COMPOSITION

- **SUBSTANCE ACTIVE BIOCIDÉ :**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (salt): 0,21 % (m/m)
- Agents de surface non ioniques
- Agents séquestrants
- Excipients

CONDITIONNEMENT

- 1 Carton de 12 flacons pissette de 500 mL..... réf. **10786160**
- 2 Carton de 12 flacons de 750 ml..... réf. **1078640**
- 3 Carton de 4 bidons de 5 L réf. **1078620**



Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.